


Järven Evakuierungstuch

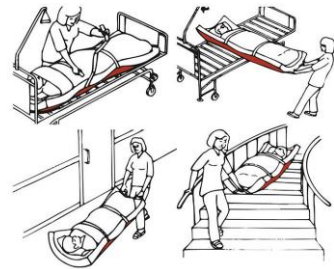

- Größe: 90 x 200 cm
- Material: Polyamid/Polyester
- Farbe: hellblau mit orangefarbenen Gurten
- bis 90°C waschbar und desinfizierbar
- Trocknergeeignet bis 70°C
- funktionsfähig mit allen Bettenmodellen und vorhandenen Pflegematratzen
- Bedienung durch eine Person
- belastbar bis 200 kg
- voll recycelbar, eine Demontage ist nicht nötig

Das Järven Evakuierungstuch macht es möglich, im Bett liegende Patienten auf schnelle und sichere Weise zu evakuieren. Es wird unter die Matratze gelegt und mit der Matratze an den vier Ecken verbunden.

Das Tuch kann zur Evakuierung auf geraden Flächen und auch über Treppen verwendet werden. Durch das ergonomische Design und dem stabilen Material gleitet es leicht auf trockenem und auch auf nassem Untergrund. Für Teppichböden (z.B. Flotex) bietet die Järven spezielle Lösungen an.

Das Järven Evakuierungstuch ist mit 4 seitlichen Griffen ausgestattet, damit es so beweglich wie möglich ist. Eine einfache und sichere Hilfe für die Evakuierung von nicht gehfähigen Patienten ist daher gewährleistet.

Kurzanleitung:

1. **Installation:** Die Matratze wird auf das Evakuierungstuch aufgelegt und mit den vier Eckbändern fixiert. Die seitlichen Klettverschlüssen müssen 5 cm vorstehen.
2. **Evakuierung:**
 - a) Patienten mit den Gurten fixieren
 - b) Griffe am Fußende greifen und Patienten seitlich aus dem Bett ziehen
 - c) Mit den Füßen voran ziehen
 - d) Die Treppe langsam vorwärts runtergehen