

EVAKUIERUNGSMATTE *MIP Typ CS653-001*



Die Evakuierungsmatte *MIP Typ CS653-001* ermöglicht die schnelle, einfache und sichere Weise Patien/Innen im Bedarfsfall zu evakuieren. Das robuste Material gewährleistet die Evakuierung von Personen mit einem Körpergewicht von bis zu 400 kg.

- Größe: 185 x 85 cm
- Material: 100% Nylon
- Farbe: rot mit schwarzen Gurten
- Aufbereitung: bis max. 80°C desinfizierend waschbar, alternativ Wisch-Desinfektion, nicht geeignet für Bleichmittel/Chlor oder Weichspüler; bei Bedarf Trocknung im Tumbler bei niedriger Temperatur
- belastbar: bis 400kg
- funktionsfähig mit allen Bettenmodellen und vorhandenen Pflegematratten
- Bedienung durch eine Person bei Patient/Innen bis 160 kg
- voll recycelbar, eine Demontage ist nicht nötig

Kurzanleitung:

Set Up/Installation: Matratze auf die Evakuierungsmatte *MIP Typ CS653-001* legen und mit vier elastischen Eckbändern fixieren. Die beiden Trageschlaufen sowie beiden Sicherungsgurte gut erreichbar unter/neben der Matratze verstauen.

Evakuierung:

- Patient/In mit Gurten fixieren (wir empfehlen eine zusätzliche Polsterung des Oberkörpers mit dem Kopfkissen unter dem oberen Sicherungsgurt)
- Griffe am Kopf- und Fußende greifen und Patient/In seitlich aus dem Bett ziehen, dabei Kopf stützen
- mit den Füßen voran ziehen und evakuieren